



## INSTRUCTIONS POUR VOTRE TEST ADN

Cochez les cases au fur et à mesure de votre avancement

### 1) PRÉLÈVEMENT DE VOS ÉCHANTILLONS ADN

- Prendre 4 coton tiges **par participant**
- Couper un des deux côtés du coton tige



Participant 1 (Père)



Participant 2 (Enfant)



Autres Participants (Si besoin)

- Frotter chaque coton tige dans la bouche imbibé de salive  
en faisant des mouvements circulaires du coton tige sur la paroi interne de la joue pendant 15  
secondes (2 coton tiges pour la joue droite, 2 pour la joue gauche)



- Laisser les coton tiges sécher à l'air libre  
en les posant sur une feuille de papier une demi-heure minimum
- Insérer les 4 coton tiges de chaque participant dans une enveloppe séparée



(Père)



(Enfant)

- Ecrire sur chaque enveloppe les informations suivantes :
  - Code Client (Fourni par email)
  - Type de Test (Test de Paternité, Test de Fratrie, Test de Semi-Fratrie, etc..)
  - Nom, Prénom, Date de Naissance
  - Date des prélèvements
- Mettre les enveloppes de chaque participant dans une plus **grande enveloppe**



## 2) FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

- Télécharger et Imprimer le formulaire de consentement [EN CLIQUANT ICI](#)
- Remplir le formulaire et insérez le dans la **grande enveloppe**

## 3) ENVOI DES ÉCHANTILLONS AU LABORATOIRE

- L'adresse du laboratoire vous sera communiquée par email** dans les 24 heures suivant votre commande.
- Écrire l'adresse du laboratoire sur la **grande enveloppe**
- Envoyer la grande enveloppe au laboratoire par courrier  
Nous vous conseillons de faire parvenir vos échantillons au laboratoire en courrier suivi.

## 4) RÉSULTATS DE VOTRE ANALYSE ADN:

Dès réception de vos échantillons au laboratoire, il faut compter entre 2 à 5 jours ouvrables pour recevoir les résultats (selon l'analyse à effectuer) **par email**

## **Vous avez des questions ?**

**Email :**

[info@francepaternite.com](mailto:info@francepaternite.com)

**Téléphone :**

**01 84 25 05 40**

Lundi - Vendredi: 10h à 19h